

medi






## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.

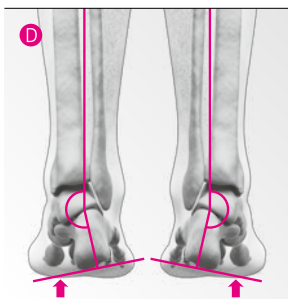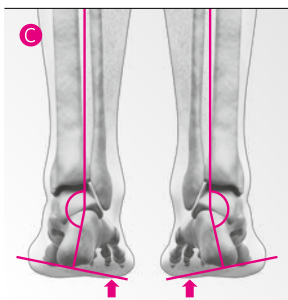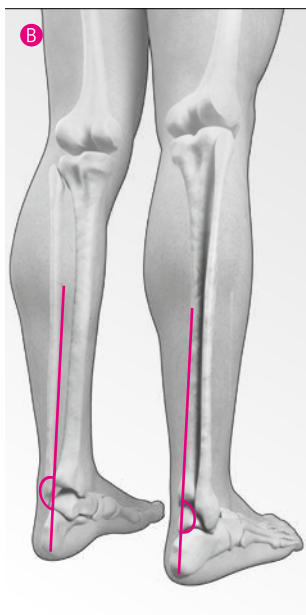

# igli carbon insole

## Функциональная терапия и активная поддержка для Ваших стоп.

Стельки igli на карбоновой основе изготавливаются для Вас вручную и индивидуально подбираются в соответствии с Вашими потребностями. Удобное ложе (1) обеспечивает снижение и перераспределение давления.

Тонкая и легкая карбоновая основа (2) на нижней стороне стельки поддерживает своды стопы (A). Специальные вырезы в карбоне способствуют естественной подвижности стопы.

С помощью постингов (3) стелька индивидуально адаптируется с учетом необходимой терапии, анатомии стопы и обуви. Постинги помогают обеспечить естественную форму сводов стопы и активизировать мышцы (A). Благодаря постингам специалист может целенаправленно влиять на архитектуру Вашей стопы. Можно приподнимать внутренний или наружный край стопы (C / D), чтобы добиться оптимальной коррекции (B).

Возможно, Вашим стопам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к стелькам igli. Если период привыкания продлится дольше двух недель, мы рекомендуем посетить Вашего специалиста по стелькам igli для контроля.

### Показания к применению

Стельки igli на карбоновой основе можно использовать для функциональной терапии при множестве ортопедических заболеваний, например: ахиллодиния / межпозвоноковая грыжа / неправильное положение тазовых костей / костная мозоль / коксартроз / пяточная шпора / гонартроз / Hallux rigidus / Hallux valgus / полая стопа / косолапость / плоскостопие / стопа с плоским поперечным сводом / повреждение боковых связок / люмбагия / маршевый перелом / повреждение мениска / метатарсалгия / болезнь Келера I + II / болезнь Леддерхозе / невралгия Мортон / артроз таранно-пяточно-ладьевидного сустава / артроз голеностопного сустава / вальгусная деформация стопы / остеопороз / синдром коленной чашечки / ретропателлярный артроз / ревматизм / приведенная стопа / синдром илиотибиального тракта.

### Противопоказания

При диабете, невропатии или болезни Паркинсона стельки igli на карбоновой основе противопоказаны.

## Что делает стельки igli такими неповторимыми?



Благодаря возможности перестановки постингов ортопедическая стелька может быть адаптирована точно в соответствии с Вашими потребностями, это обеспечивает эффективность на всех стадиях лечения.



**Гибкая карбоновая основа** поддерживает Вашу стопу, не ограничивая при этом ее естественную подвижность.



**Анатомическая форма** карбоновой основы обеспечивает идеальную поддержку сводов Вашей стопы.



**Карбоновый материал** возвращает стопе силу при ходьбе, оказывает микромассаж и борется с любой мышечной усталостью.




**Легкость карбоновой конструкции** позволяет раскрыть всю эффективность стельки, не ощущая ее при этом в обуви.


### Общие рекомендации

- Используйте Ваши стельки только в предназначенной для этого обуви.
- Регулярно проверяйте стельки, чтобы гарантировать функциональность и эффективность.
- Не перемещайте постинги самостоятельно – этим должен заниматься только квалифицированный специалист igli.
- Не допускайте детей в возрасте до 6 лет к стелькам во избежание проглатывания мелких деталей.

### Рекомендации по уходу

- Протирайте Ваши стельки igli влажной салфеткой только при необходимости.
- Не используйте для очистки растворители, содержащие ацетон.
- Сушите Ваши стельки вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.

 Не стирать

 Не сушить в сушильных машинах

 Не подвергать химической очистке

 Утилизация вместе с бытовыми отходами